



クリーナーキット付
補聴器用バッテリーチェッカ

BC08



バッテリーチェッカの使い方

電池の正極(+)面を上にし、負極(-)面を盤面に置き、電池側面が上部の金属板に接触するまでスライドしてください。
表示画面にバッテリー残量が表示されます。

表示		バッテリー残量の状況
80%以上		バッテリー残量は充分にあります。
80%~65%		バッテリー残量が少なくなってきました。
65%以下		バッテリーを交換してください。

*バッテリーの消耗を防ぐため、10秒以上の連続計測は避けるようにお願いします。

5種類の補聴器クリーナーキット

- クリーニング用ブラシ
- バッテリー収納蓋オープナ
- 耳垢取りワイヤ・ループ
- 電池取出/挿入用磁石棒
- チューブ・クリーナー用ワイヤ