

Bellman Visit Alarm Clock

ベルマンビジット アラームクロック受信器

BE1580

取扱説明書



■ 仕様

型式	BE1580
名称	ベルマン ビジット アラームクロック受信器
サイズ(mm)	本体: 108(H) x 121(W) x 92(D)、時計面: 45(H)x73(W)、ベッドシェーカ: φ88x27
重量(g)	本体: 390(充電電池込) ベッドシェーカ: 120
対応受信器	BE1410, BE1420, BE1430, BE1430F, BE1490
時間表示液晶タイプ	TN (Twisted Nematic)型LCD
表示画面バックライト	白色・5段階調度調整・表示継続時間: 8秒間
常夜灯	EL (Electro Luminescence) ライト
アラーム機能	アラーム作動時間: 20分
アラーム音	100dB@10cm, 94dB@30cm, 950-3,000Hzマルチトーン信号
フラッシュライト	高輝度拍動式LEDランプ x 4個 各2,500mCd
ベッドシェーカ	振動強度: 2.0-4.0VDC (BE1271)
スヌーズ機能	9分後にアラーム作動。その後は7分後、5分後、3分後とスヌーズ間隔は短縮
外部トリガ接続	3.5mmステレオジャック (BE9086)
電話線接続	公衆回線: 26-120V RMS, 15-100Hz
無線周波数帯	314.9MHz
無線到達範囲	直線見通距離約30m
作動温度	15℃~35℃
作動湿度	5%~95% 結露無きこと
電源	7.5VDC, 1,000mA ACアダプタ
充電電池	単四NiMH充電電池 x 4、停電時、12~48時間アラーム機能保持

※注意: フラッシュライトの点滅はテンカンを引き起こす可能性があります。

品質保証

ご購入後一年間は、製造に起因する材質上、性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換にて品質保証いたします。使用上の不注意による故障や製品に付属するケーブル類の断線・破損、またはアルカリ電池の使用や劣化充電電池を入れたままの状態が原因の故障、劣化は保証対象外となります。

販売代理店: ご購入日 年 月 日



mimi こむ 株式会社
<https://mimicom.co.jp>


■ はじめに

アラームクロック受信器はベルマンビジット屋内信号装置の時計型受信器です。発信器の信号を受信して該当の屋内信号LEDを点灯させます。発信器の信号受信時、またはアラーム時間になるとアラームを鳴らし、フラッシュライトを光らせ、ベッドシェーカで枕を振動させてお知らせします。

■ 準備

- 底面、充電電池収納口の絶縁紙を引き抜きます。
 - ACアダプタとベッドシェーカをさします。
(必要に応じて、電話/FAX、モバイルフォンセンサを繋げます)
 - 現在時刻を合わせます。
- 発信器の受信、アラーム時間にアラームクロックが反応することを確認しましょう。

■ 同梱内容

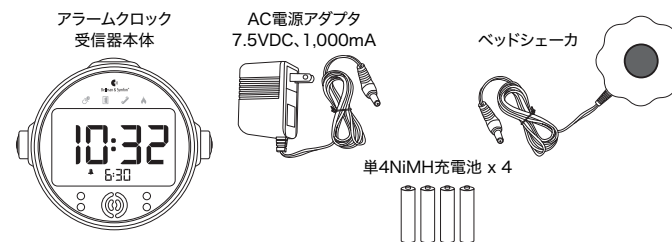


■ 発信器とのペアリング方法

初期設定ではすでにペアリング済みです。発信器のチャンネルをご自身で変更した場合は以下のペアリング設定を行う必要があります。

【SNOOZE ボタン】を5秒以上長押しすると【屋内信号LED】のドア () と電話 () の2つのLEDが点滅します。



点滅している間に発信器 (どれか1つで良い) のテストボタンを押します。【屋内信号LED】が左から順番に () () () () 点滅するとペアリングは完了です。

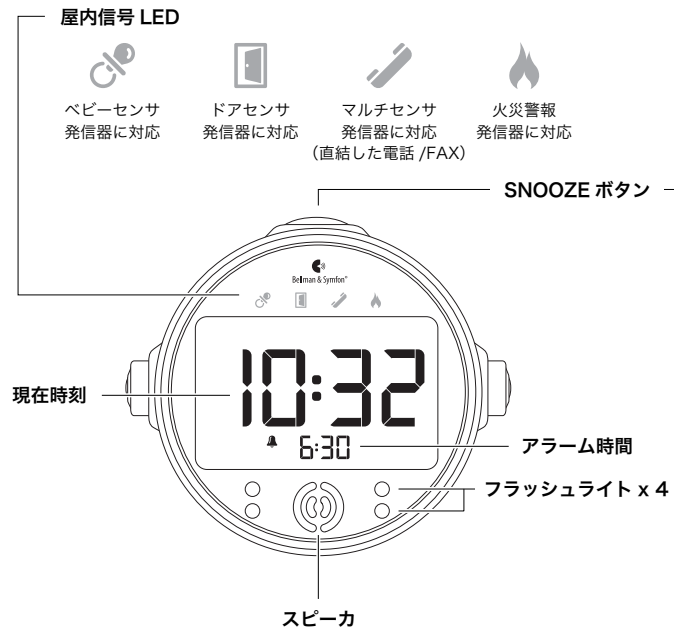

■ 現在時刻/アラーム時間の設定


現在時刻とアラーム時間の設定は押すボタンが違うだけで操作方法は同じです。
【時刻設定ボタン】【アラーム時間設定ボタン】を使用します。
※ 時間表記が 12 時間の場合、午前・午後 (AM/PM) を確認してください。

ボタンを押すと【時間表示/アラーム時間表示】が点滅します。
点滅中にボタンをまわして時間を合わせボタンを再度押して時間を確定します。
【分表示/アラーム分表示】が点滅しますので、同様にボタンをまわして分を合わせ、ボタンを再度押して分を確定します。

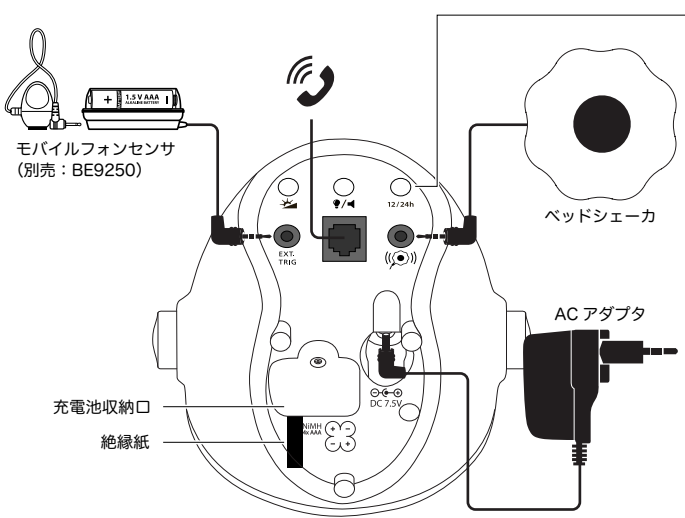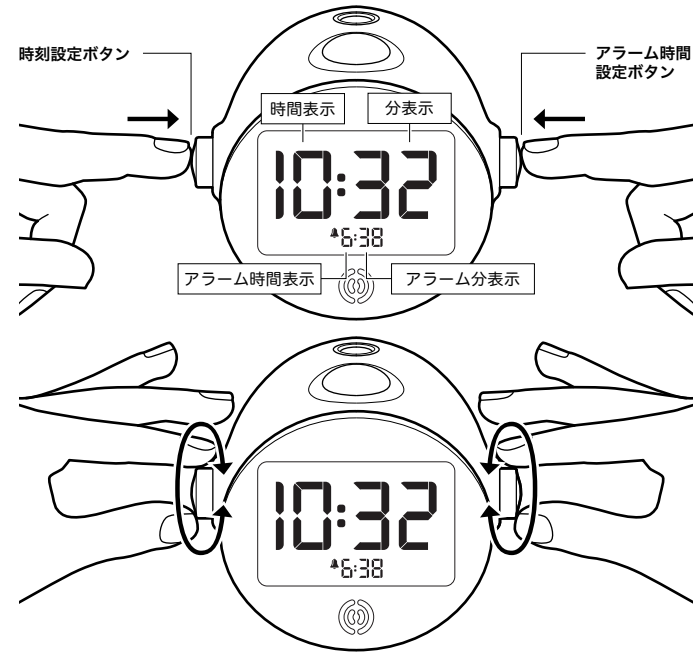


バックライトボタン
バックライトを 5 段階調整 (8 秒で消灯)
常時消灯 → 弱 → 中 → 強 → 常時点灯 (中)

フラッシュ / サウンドボタン
フラッシュライトとアラーム音の有無を設定。
アイコンが非表示の場合は ON です。

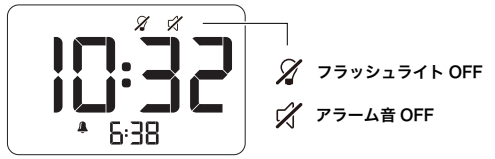

12/24h 時間表示切替ボタン
12 時間表示 (AM/PM) または 24 時間表示に切り替え。

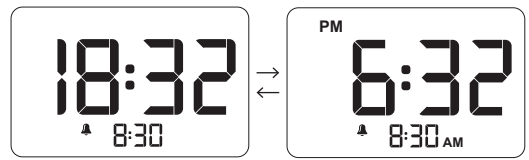


■ アラームの使い方

● アラームの ON/OFF
本体上部【アラームボタン】を押します。
ON : [赤点灯] / [表示]
OFF : [消灯] / [非表示]

● アラームの停止
アラーム動作中に【アラームボタン】を押す。
放置した場合 20 分後に自動的に停止します。

● スヌーズ
アラーム動作中に【SNOOZE ボタン】を押す。
アラームが一時停止、9 分後に再作動します。
ボタンを押すたびに 9 分、7 分、5 分、3 分、2 分後とスヌーズの間隔が短くなります。

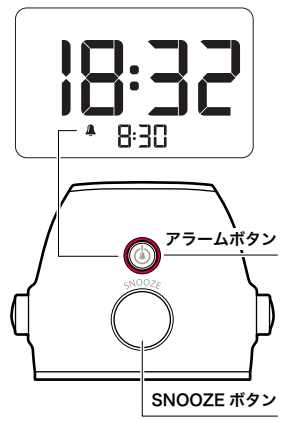

マルチセンサ発信器とは別に電話線を繋げて電話/FAXの着信を感知することができます。
別売りのモバイルフォンセンサを繋げるとスマホやタブレットの着信を感知することができます。