

セントラルアラート用 オーディオセンサ CA-AX

取扱説明書




株式会社 自立コム

はじめに


CA-AX オーディオセンサは、CA-360J セントラルアラート用のオプション機器です。CA-AX は火災警報器などの警報音を感知します。警報音を15秒以上感知すると、CA-AX は登録している CA-360J に対して無線を発信します。CA-AX は、警報音の中断が1秒未満の警報器に使用できます。警報音の中断が長い警報器には反応しません。または、無電圧 a 接点を持つ警報器と接続する事が出来ます。CA-AX は登録している CA-360J に対して電池残量信号を送信します。CA-AX の送信ランプは15秒毎に点滅し、電池残量がある事を示します。送信ランプの点滅が弱くなったり、止まった場合はすぐに電池を交換してください。

電池の取付け

1. 単三アルカリ電池2本を本体に取付け電源スイッチを入れます。

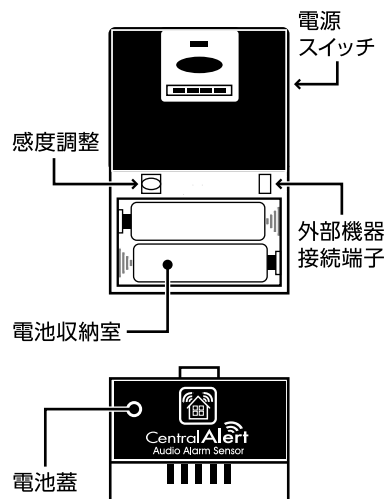

2. テストボタンを押し、送信ランプが点灯する事を確認してください。

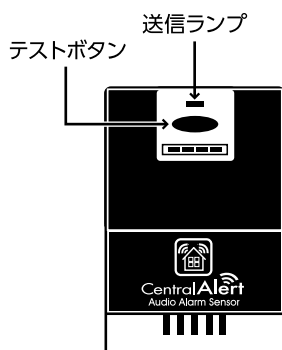

CA-360J に登録する

※CA-AX は、ご使用前に CA-360J 本体に登録する必要があります。

1. CA-360J の設定ボタンを **RUN** の位置にし、**TEST** ボタンを **LEAr** と表示されるまで5秒間長押しします。
2. CA-AX の **TEST** ボタンを5秒間長押しします。CA-360J のディスプレイに **AS n** と表示され、スピーカが ON の場合はピープ音が鳴ります。(AS n の n は登録している機器の数により変化します)
3. これで登録作業は完了です。CA-360J の **RESET/SNOOZE** ボタンを押して登録モードを終了します。

設置とテスト (警報音感知)

1. CA-AX のマイクが警報器の方向へ向くようにします。
2. 警報器から約5cm 程度の距離に、2つのネジと取付け穴を利用して設置します。
3. 通常時、CA-AX は15秒毎に送信ランプが点滅します。
4. 警報器の音を15秒以上鳴らし、正常に作動する事を確認してください。安全の為、定期的な動作の確認をするようにしてください。
5. 正常に感知しない場合、電池収納室の上にある感度調整スイッチを、+ドライバで調整してください。右に回すと感度が上がり、左に回すと感度が下がります。

設置とテスト (移報接点接続)

※警報器のテストに関しては、各警報器のマニュアルを参照してください。

1. 移報接点用ケーブルを、CA-AX の外部機器接続端子に繋ぎ、CA-AX と警報器を接続します。
2. 警報器をテストボタンなどで作動させ、CA-AX が正常に作動する事を確認してください

仕様

- | | |
|--|--|
| 1. 無線：
2.4GHz の先進的無線技術 | 6. サイズ：
64mm×95mm×21mm |
| 2. 無線到達距離：
見通しの良い場所で 60m。ただし設置場所の環境により実際の無線到達距離は短くなります。 | 7. 重量：
60g(電池別) |
| 3. 登録可能数：
10 個の CA-AX が同一システム内で使用できます。 | 8. 商品仕様：
商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 |
| 4. 電池：
単三アルカリ電池 2 個 | 9. 保証：
ご購入後1年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証します。 |
| 5. 電池寿命：
約 10 ヶ月 | |

株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com>

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号

5F 代表 Tel.03-3476-2160
Fax.03-3476-2425

修理・デモ機 Tel.03-3476-2175
Fax.03-3476-2435

営業時間：09:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休業