

# セントラルアラート用 ベビーセンサ CA-BX

## 取扱説明書



株式会社 自立コム


## はじめに

CA-BX ベビーセンサ発信器は、CA-360J セントラルアラート用のオプション機器です。赤ちゃんの泣き声を感知し、登録している CA-360J に対して無線を発信します。2種類の感度調整スイッチにより、細かい設定が可能です。

CA-BX ベビーセンサ発信器はリアルタイムに赤ちゃんの泣き声を感知します。CA-360J は、CA-BX が赤ちゃんの泣き声を感知している間だけ通知し、赤ちゃんが泣き止むと即座に通知は止まります。

## 電池の取付け

1. 単三アルカリ電池2本を本体に取付け電源スイッチを入れます。

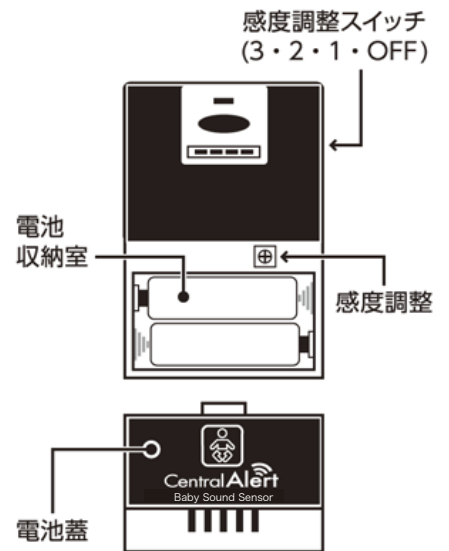

## CA-360J に登録する


※CA-BX は、ご使用前に CA-360J 本体に登録する必要があります。

1. CA-360J の設定ボタンを **RUN** の位置にし、**TEST** ボタンを **LEAr** と表示されるまで5秒間長押しします
2. CA-BX のテストボタンを5秒間長押しします。CA-360J のディスプレイに **bs n** と表示され、スピーカが ON の場合はビープ音が鳴ります。(bs n の n は登録している機器の数により変化します。)
3. これで登録作業は完了です。CA-360J の **RESET/SNOOZE** ボタンを押して登録モードを終了します。

## 設置とテスト

1. CA-BX のマイクを、赤ちゃんの方に向けて、安定した場所に置きます。
2. 本体側面の感度調整スイッチと、電池収納室上部の感度調整で、赤ちゃんの泣き声を感知しやすいように調整します。電池収納室の感度調整は、+ ドライブで回します。右に回すと感度が上がり、左に回すと感度が下がります。
3. 音声感知表示のレベルが4になると、送信ランプが点き、登録している CA-360J に対して無線を発信します。
4. マイクに向かって音を出し、正常に作動する事を確認してください。




2. テストボタンを押し、送信ランプが点灯する事を確認してください。
3. マイクに向かって音を出し、音声感知表示が動作する事を確認してください。

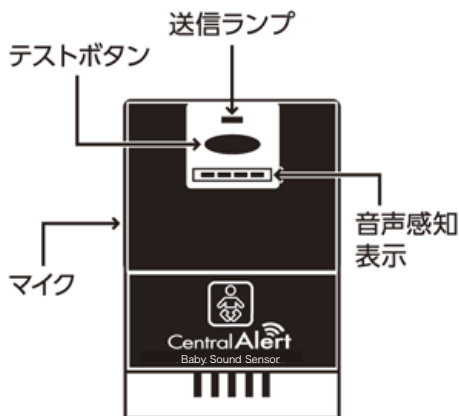

## 仕様

1. 無線：  
2.4GHz の先進的無線技術
2. 無線到達距離：  
見通しの良い場所で 60m。ただし設置場所の環境により実際の無線到達距離は短くなります。
3. 登録可能数：  
3個までの CA-BX を同一システム内で使用出来ます。
4. 電池/電池寿命：  
単三アルカリ電池 2 個/約 10 ヶ月
5. サイズ/重量：  
64mm×95mm×21mm / 60g (電池別)

6. 商品仕様：  
商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
7. 保証：  
ご購入後1年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証します。

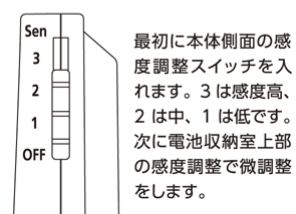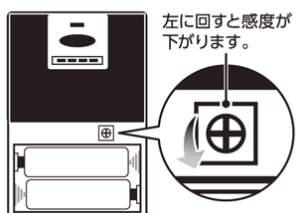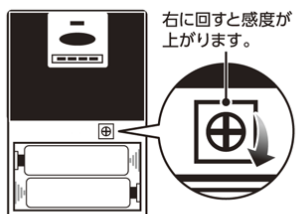

株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com>

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号

5F 代表

Tel.03-3476-2160

Fax.03-3476-2425

修理・デモ機

Tel.03-3476-2175

Fax.03-3476-2435

営業時間：09:00～17:00 (昼休：12:00～13:00)

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は休業