

セントラルアラート用リモート受信器

SERENE®

MODEL **CA-RX**

取扱説明書



JiritsuCom

株式会社 自立コム

はじめに

CA-RX リモート受信器は、CA-360J セントラルアラート用の無線受信器です。CA-RX は、広いご家庭や事務所で無線到達範囲を広げる為に使用します。CA-RX は、台所、勉強部屋、リビング、お手洗いなどでの使用に最適です。この機器は、CA-360J セントラルアラート本体と同様の通知機能があります。(ベッドシェーカ、フラッシュ、音、アイコン)

※時計表示機能、目覚まし通知機能はありません。

※ベッドシェーカは附属しません。

安全の為に

火災や感電、怪我を避けるために以下の注意事項をお守りください。

- ①ご使用前に取扱説明書を良くお読みください。
- ②機器を金属面の上に設置しないでください。
- ③この機器は充電池を使用出来ます。充電の際は、乾電池は決して使わないでください。電池の液漏れの原因になります。
- ④お子様の近くで使用する場合は、目を離さないようにしてください。
- ⑤スイッチの中や電池蓋内部の金属部分に触れないようにしてください。
- ⑥メーカーや販売店が推奨するオプション品以外は使用しないようにしてください。
- ⑦戸外や水の近くでは使用しないでください。
- ⑧ケーブルを引っ張ってプラグを抜かないでください。
- ⑨ご使用にならない時は、電源プラグは抜いてください。
- ⑩破損した電源ケーブルは使用しないでください。落としたり、破損したり、不具合が生じた際は、ご使用を中断し、販売店またはメーカーで修理・点検をしてください。
- ⑪商品の仕様は、予告なく変更される事があります。

同梱物




- ・ CA-RX リモート受信器本体 x 1
- ・ AC アダプタ x 1
- ・ 本マニュアル x 1
- ・ 単三充電電池 x 3

設置テスト


- ① AC アダプタをお近くのコンセントに差し、CA-RX と接続します。
- ② 付属の単三充電電池を入れます。初めてお使いになる際は、10時間充電をしてください。

注意：アルカリ乾電池は使用できません。乾電池を使用すると本体故障の原因となり、保証の対象外となります。



- ③  **音量スイッチ**  をお好みの位置にセットし、**電源スイッチ**をON にしてください。
- ④  **FLASHER/SHAKER/ALL** をお好みの位置にセットしてください。(ベッドシェーカーは別売りです)
- ⑤ **SOS** ボタンを押すと、45 秒間設定した通知が作動します。
(**RESET/RECALL** ボタンを押すと止まります)

各部名称

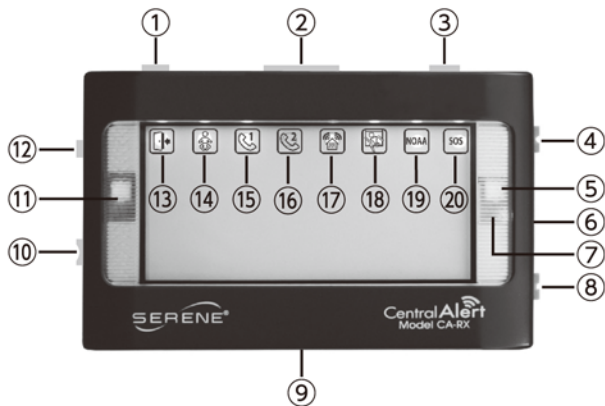

- ①電源 ON/OFF スイッチ
- ②RESET/RECALL ボタン（3秒間長押しすると、最後に受信した通知を表示）
- ③SOS ボタン（他の受信器に対して呼出を行います。）
- ④出力選択ボタン
- ⑤フラッシュランプ
- ⑥電源接続コネクタ
- ⑦パワー ON/OFF 表示（バッテリー低下時は点滅します）
- ⑧スピーカ音量調整ボタン
- ⑨電池収納室（背面）
- ⑩モーションセンサ ON/OFF スイッチ（別売りのモーションセンサが必要です）

- ⑪フラッシュランプ
- ⑫ベッドシェーカ接続コネクタ
- ⑬ドアアイコン（別売りのドアセンサ、またはドアベルが必要です）
- ⑭ベビーセンサアイコン（別売りのベビーセンサが必要です）
- ⑮電話着信アイコン
- ⑯携帯電話着信アイコン（別売りの携帯電話センサが必要です）
- ⑰オーディオセンサアイコン（別売りのオーディオセンサが必要です）
- ⑱モーションセンサアイコン（別売りのモーションセンサが必要です）
- ⑲警報アイコン（CA360J 本体に警報器を接続している場合、通知します）
- ⑳SOS アイコン（CA360J または他のリモート受信器からの呼出しを通知します）

■ フラッシュライトを点ける

- ① **RESET/RECALL** ボタンを押すとフラッシュランプが点灯します。
- ② もう一度 **RESET/RECALL** ボタンを押すと消灯します。

■ 最後の通知を確認する

CA-RX は最後に通知したアイコンを呼び出す機能が内蔵されています。


- ① **RESET/RECALL** ボタンを3秒間長押しすると、最後に通知したアイコンが45秒間点灯します。

内部メモリの消去と登録

CA-RX を CA-360J と一緒に使用する場合、事前に登録する必要があります。
CA-360J に登録出来ない場合は、一度内部メモリを消去する必要があります。

- ① **SOS** ボタンを18回連続で素早く押してください。成功するとビープ音が鳴ります。
(スピーカのボリュームが OFF になっている場合は鳴りません)
- ② 次の登録方法1を参考に、CA-RX を登録してください。


登録方法1：CA-RX を CA-360J の受信機として登録

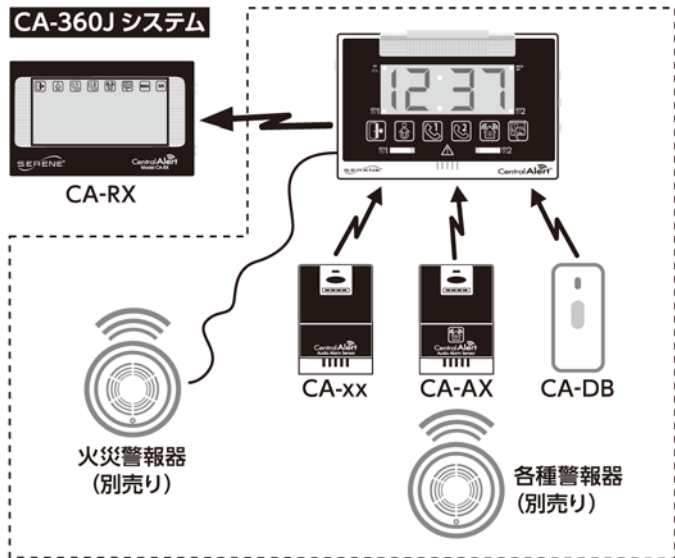

左の図は CA-360J のシステムの中に、CA-RX を登録して、離れた場所で通知を受信する為の一例です。複数の CA-RX を使用する場合、全ての CA-RX を登録する必要があります。(CA-RX は10台まで同一のシステム内に登録出来ます)



- ①CA-360J の設定スイッチを**RUN**の位置にします。CA-360Jの **TEST** ボタンをビープ音が鳴るまで 6 秒間長押しします。(音量設定が OFF になっている場合は鳴りません) CA-360J の画面に **[LEAr]** と表示され、新しい機器の登録モードになります。
- ②CA-RX の **SOS** ボタンを約6秒間長押しします。登録中は全てのアイコンが光り、登録が成功すると、ビープ音がなります。(音量設定が OFF になっている場合は鳴りません)
- ③CA-360J の **RESET** ボタンを押すと登録は終了します。
- ④CA-RX の **SOS** ボタンを押して、CA-360J が反応する事を確認してください。**RESET/RECALL** ボタンを押すと通知は止まります。
- ⑤ドアベルなど、あらかじめ登録されている発信器を作動させ、CA-360J と CA-RX が反応する事を確認してください。45 秒間放置するか、**RESET** ボタンを押すと通知は止まります。
- ⑥これで、CA-360J と CA-RX の両方が、各発信器からの信号を通知します。

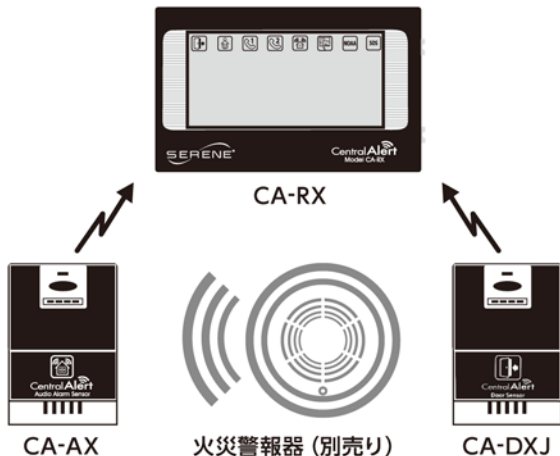登録方法2：CA-RXを単独のシステムとして使う



上の図は、CA-RX をシンプルなシステムとして活用する一例です。この図では、来客と火災警報を知ることが出来ます。全体のシステムをコンパクトに、軽く出来ますので、旅行などに携帯する事が出来ます。CA-DXJ には振動を感知するドアノックセンサ機能が内蔵されていますので、旅行先のホテルのドアに貼り付けて使用する事が出来ます。また、CA-DB と一緒に持ち歩き、呼出装置として利用しても便利です。

- ①全ての機器に電池を入れ、スイッチをONにしてください。
- ②CA-RX の **SOS** ボタンを、ピープ音が鳴るまで18回素早く連続で押し、内部メモリを消去してください。(音量設定が OFF になっている場合は鳴りません)

- ③CA-RX の **RESET/RECALL** ボタンと **SOS** ボタンの両方を同時に約6秒間長押しします。ビーブ音が鳴り、全てのアイコンが点滅し、機器を登録するモードになります。(音量設定が OFF になっている場合はビーブ音は鳴りません。)
- ④発信器のテストボタン  を CA-RX からビーブ音が鳴るまで約6秒間長押しします。(音量設定が OFF になっている場合はビーブ音は鳴りません。)
- ⑤発信器が複数ある場合は、④のステップを繰り返してください。
- ⑥**RESET/RECALL** ボタンを押し登録を終了します。
- ⑦発信器のテストボタン  を押して、CA-RX が反応する事を確認してください。
- ⑧これで CA-RX は発信器からの信号を通知します。

仕様

無線	2.4GHz
ベッドシェーカ出力	5VDC, 150mA
バックアップ電池 (単三 ×3)	約48時間稼働
DC 入力	5VDC, 600 ~ 1,000mA
電源アダプタ	100 ~ 240VAC 50/60Hz
動作温度	10℃~ 35℃
保存温度	-10℃~ 40℃
本体サイズ	117.5mm×70mm×26mm
本体重量	142g

①アルカリ乾電池は使えますか？

A. いいえ、使えません。

本体の故障や事故の原因になりますので、必ず充電電池をお使いください。

②充電電池でどれくらい稼働しますか？

A. フル充電で約48時間稼働します。

③CA-360Jに機器の登録が出来ません。

A. SOS ボタンを連続で18回押して内部メモリを消去してから、再度登録してください。

④CA-360Jからどのくらい離れて設置出来ますか？

A. 見通しの良い直線距離で約60mです。

しかし、扉や壁などによりその距離は短くなります。

⑤オプション類との通信距離はどのくらいですか？

A. CA-360Jと同様に約60mですが、扉や壁などによりその距離は短くなります。

⑥Wi-Fiのルータ等の側に設置出来ますか？

A. いいえ、Wi-Fiルータに限らず、全ての電子機器から1.5m以上離して設置してください。

⑦オプション類はいくつまで登録出来ますか？

A. 4台のドアベルまたはドアセンサ／10台のリモート受信器 (CA-RX)
10台の携帯型受信器 (CA-PX) / 10台の火災警報発信器 (CA-AX)
3台のベビーセンサ発信器 (CA-BX) / 1台の携帯電話発信器 (CA-CX)
が登録出来ます。

オプション類

CA-AX	オーディオセンサ
CA-BX	ベビーセンサ
CA-CX	携帯電話着信センサー
CA-DB	ドアベル
CA-DXJ	ドアセンサ
CA-LX	ランプ接続コネクタ
CA-MX	モーションセンサ
CA-PX	携帯型受信器
CA-RX	リモート受信器
BS-100	ベッドシェーカ
CA-BP	予備用充電電池

品質保証

ご購入後一年間は、製造に起因する材質上、性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換にて品質保証いたします。不適切な使用による故障や破損は保証対象外とします。

販売店名

ご購入日 年 月 日

発売元:  株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com/>

〒150-0044

東京都渋谷区円山町28-4 大場ビル

TEL.03-3476-2160 FAX.03-3476-2425

製造元: 米国

製造国: 中国