



## 取扱説明書 Bellman & Symfon®

### ベルマン ネックループ

BE9159

小型・軽量の高出力磁気誘導ループです。  
集音器やスマートフォン、テレビ、ラジオ、PC  
などにつなげて、鮮明な音を聴くことができ  
ます。

お使いの補聴器「Tモード/MTモード」で  
受信して補聴を強化することもできます。

## 仕様

サイズ	W34 x H38 x D14mm
重さ	60g
ループ直径	220mm
ケーブル長	900mm
コネクタ	3.5mm (ステレオ) 金メッキコネクタ インピーダンス: 2 x 5Ω
磁気出力	1500mA/m (150mm距離) 2 x 50mW入力信号


## 使い方

磁気誘導つき補聴器、3.5mmステレオヘッドフォンジャックを備えた機器に使用できます。




### ● 補聴器

「Tモード/MTモード」で受信します。  
【推奨】補聴器から約15cm離れた位置。

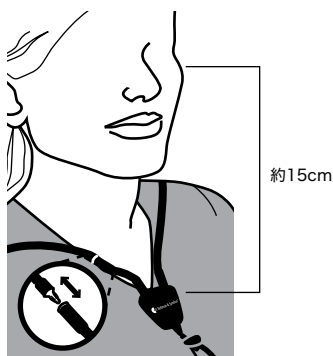

### ● ベルマン集音器

ベルマンミノやベルマンドミノなどの集音器に取り付け  
(イヤホンは別売)

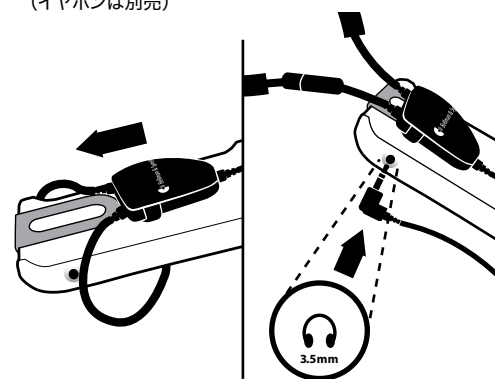

## 品質保証

ご購入後一年間は、製造に起因する材質上、性能上の欠陥につきましては、  
修理または商品交換にて品質保証いたします。使用上の不注意による故障  
や製品に付属するケーブル類の断線・破損は保証対象外となります。

mimi こむ 株式会社  
<https://mimicom.co.jp>



販売代理店：ご購入日 年 月 日