

# ミュートスイッチ付音声認識ケーブル

この音声認識ケーブルは、

①分配器（音声認識と同時にヘッドホンなどで  
音声を聴く場合に使用）

②音声認識ケーブル本体

③ミュートスイッチ


の3つで形成されています。

「スマホ」ラベルのプラグと  
ミュートスイッチを接続します。

\*ミュートスイッチが不要な場合は  
直接スマホに接続してください。

反対側のジャックには、  
ミノに付属のイヤホンや  
別売りのヘッドホン、  
ネックループ、  
Mリンクなどを接続  
して音声を聞きます

分配器をベルマンミノの  
イヤホンジャックにさします。

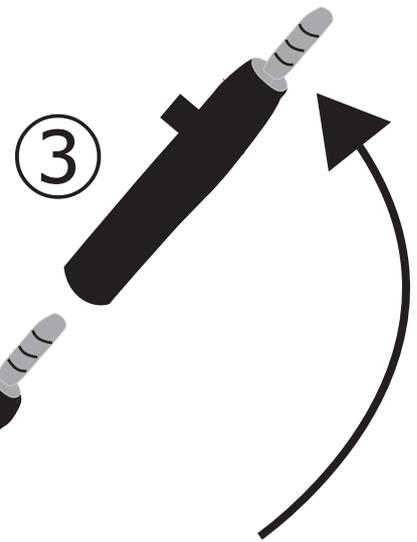

ミュートスイッチ  
とスマホを接続します。

\*3.5mm ジャックのない  
iPhone の場合は、  
ライトニング⇔3.5mm  
変換ケーブルを使用し  
てください。

「Mino」ラベルのプラグと  
分配器を接続します。  
\*ヘッドホンやイヤホンを  
同時に使わない場合は  
分配器を使いません。

