

品質保証

ご購入後一年間は、製造に起因する材質上・性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換により品質保証いたします。

保証書


販売日 年 月 日

販売店名

CA-ALM2

セントラルアラームクロック 振動式目覚まし時計

ユーザーマニュアル

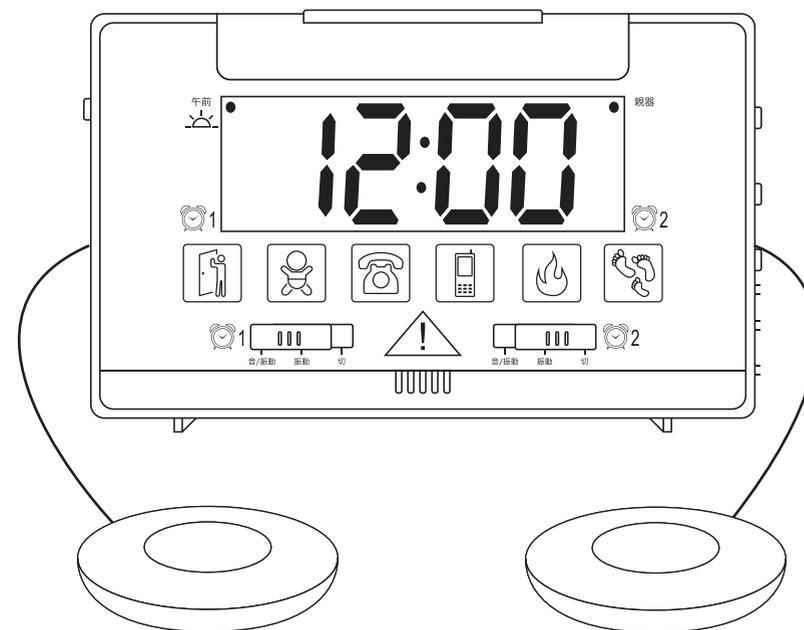

発売元：

JiritsuCom 株式会社 自立コム

<http://www.jiritsu.com/>

〒150-0044


東京都渋谷区円山町28-4 大場ビル 5F

TEL.03-3476-2160 FAX.03-3476-2425


220107v2

JiritsuCom

同梱内容

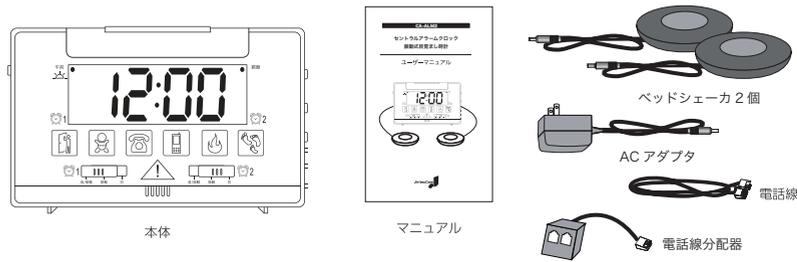


設置

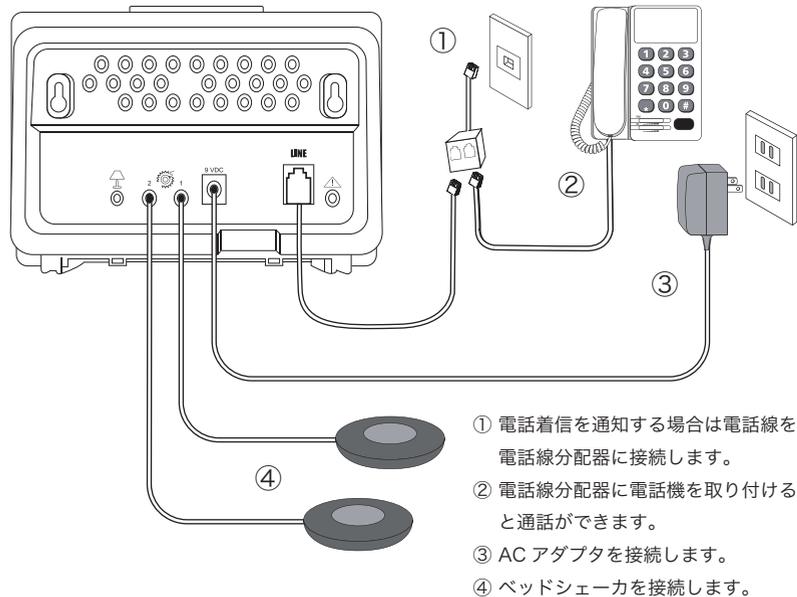

時刻の設定

1. スライド式の設定スイッチ (CA-ALM2 の右側面) をTIMEの位置にセットして、HR(時)とMIN(分)ボタンを押して時刻の設定をします。それぞれボタンを押すと時刻が進みます。長押しすると時刻が連続的に進みます。
2. 時刻設定が終わりましたら、設定スイッチをRUNの位置に設定して通常の時計表示にします。

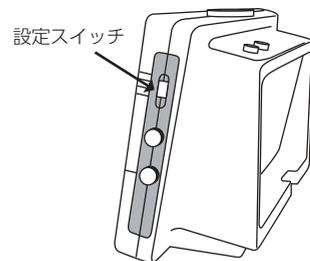


12/24 時間設定

1. 工場出荷時の初期状態では12時間表示モードに設定されています。
2. 設定スイッチをTIMEの位置にしてTESTボタンを5秒間長押しすると24時間表示になり、再度TESTボタンを5秒間長押しすると12時間表示に戻ります。
3. スライド式設定スイッチをRUN位置にして通常時計の状態にします。

アラーム時刻の設定

1. スライド式の設定スイッチ (CA-ALM2 の右側面) を1(アラーム1)の位置にして、HR(時)とMIN(分)ボタンを押してアラーム時刻の設定をします。
2. アラーム時刻設定が終わりましたら、設定スイッチをRUNの位置に設定し、通常の時計表示に切り替えます。
3. ディスプレイ前面のアラーム1用設定スイッチを「振動」もしくは「音/振動」に設定します。「振動」を選択すると、ベッドシェーカーとフラッシュライトのみでの目覚ましとなります。「音/振動」を選択するとベッドシェーカーとフラッシュライトと音での目覚ましとなります。音量切替は大・小を選択してください。アラームが作動すると時計表示ディスプレイはAL1(およびAL2)を表示します。

注意: アラーム1 ON/OFF表示およびアラーム2 ON/OFF表示は、スイッチを「振動」または「音/振動」に設定すると点灯します。

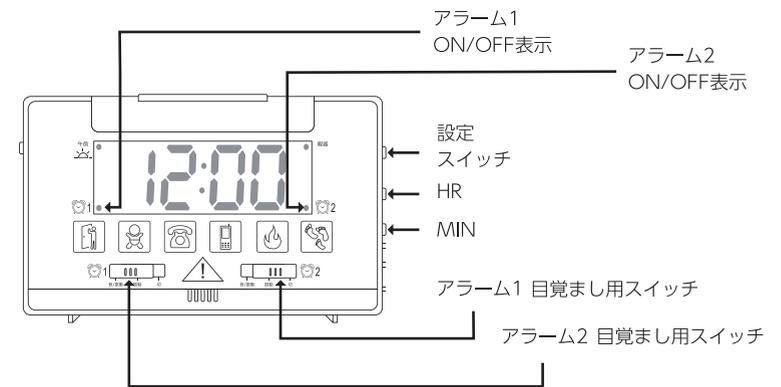

注意: 同じアラーム時刻に両方のベッドシェーカーを振動させるためには、アラーム1およびアラーム2を同じ起床時間に設定する必要があります。

4. 目覚ましアラームは45秒作動して、5分間止まります。この動作を1時間繰り返します。
5. 目覚ましアラームが作動している間にRESET/SNOOZEボタンを押すと、1時間の間、5分毎にスヌーズ機能が動きます。
6. RESET/SNOOZEボタンを2秒間長押しすると、次の日までアラーム機能は停止します。(ディスプレイにStopが表示されます)
7. 前面のスライド式アラーム1目覚まし設定用スイッチをOFFにすると、アラーム機能は切れます。

電話機の設置と着信の通知

1. 付属の電話線分配器と電話線を使い電話機を設置します。設置の項目のイラストを参考にしてください。
2. 電話の着信音が鳴っている間、電話のアイコンやフラッシュが光ります。
3. 通話を開始すると全ての通知が停止します。